



CONTACT
SÉCURITÉ

AVRIL 2018

MANUEL D'UTILISATION

CHAISE PORTOIR PLIABLE

réf. PP

PP 




FABRICATION FRANÇAISE


Testé
à 250 kg
de charge



La Chaise Portoir Pliable est destinée au transport des patients malades et blessés en position assise dans le cadre d'une évacuation d'urgence ou d'un transport sanitaire. Seuls des brancardiers habilités sont susceptibles d'intervenir et de manipuler ce dispositif lors du transport d'une personne.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 - Code APE 331 B - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115




1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Un cadre en acier chromé équipé de 2 roues diamètre 125 mm situées à l'arrière, d'une poignée de portage rabattable au dossier, d'œilletons de fixation sur le cadre de dossier et sur les montants latéraux pour le portage par bretelles.

Une toile enduite plastifiée, matelassée et renforcée sur 2 épaisseurs avec à l'arrière du dossier un porte document amovible et transparent. (Résistance à la déchirure : 30 daN/5 cm aussi bien en chaîne qu'en trame. Résistance à la rupture : 280 daN/5cm aussi bien en chaîne qu'en trame. Poids : 670 g/m²)

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Largeur hors tout pliée ou dépliée	: 505 mm.
Hauteur hors tout dépliée	: 1035 mm.
Hauteur pliée	: 587 mm.
Profondeur de l'assise	: 410 mm.
Largeur de l'assise	: 470 mm.
Épaisseur pliée	: 170 mm.
Poids	: 8,6 kg.

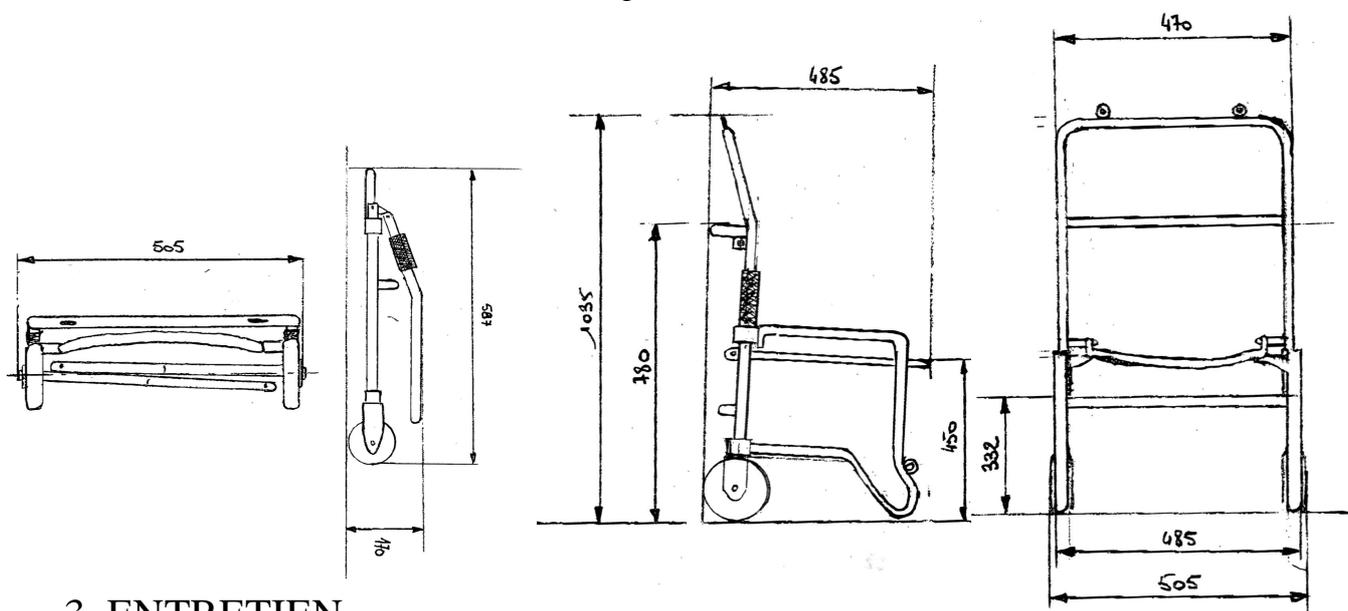

3. ENTRETIEN

- Lubrifier les coulisseaux de dossier.
- S'assurer du fonctionnement correct des éléments mécaniques.
- Contrôler le serrage de l'ensemble de la visserie.
- Vérifier l'état d'usure de la toile d'assise et de dossier.

4. UTILISATION

➤ DEPLIAGE DE LA CHAISE :

Ouvrir les montants latéraux gauche et droit de 90 degrés par rapport à la position de l'assise et du dossier.

Relever le cadre d'assise à l'horizontal par rapport au sol en s'assurant que ce dernier repose sur les pattes gauche et droite de maintien positionnées sur les montants latéraux.

Relever le dossier à la verticale en s'assurant que les coulisseaux de dossier soient correctement verrouillés en position basse.

Relever la poignée de portage du dossier.

➤ PLIAGE DE LA CHAISE EN 2:

Rabattre la poignée de portage du dossier.

Désolidariser le cadre d'assise des pattes de maintien des montants latéraux puis soulever totalement l'assise vers le haut.

Replier les montants latéraux vers l'intérieur.

➤ PLIAGE DE LA CHAISE EN 4:

Rabattre la poignée de portage du dossier.

Relever les coulisseaux de dossier puis rabattre le dossier vers l'arrière.

Désolidariser le cadre d'assise des pattes de maintien des montants latéraux puis rabattre l'assise vers le bas et replier les montants latéraux vers l'intérieur.

➤ TRANSPORT DU PATIENT :

Le transport du patient sur ce dispositif ne peut s'effectuer que par 2 brancardiers ou plus.

Le blessé est assis sur la Chaise Portoir Pliable.

Il est recommandé d'immobiliser ce dernier sur le dispositif à l'aide de 2 sangles de maintien (Réf. CST).

Basculer la chaise et le patient vers l'arrière à environ 60° en tirant simultanément le dossier vers l'arrière et en poussant avec le pied vers l'avant la traverse inférieure.

Le brancardier arrière soulève la chaise et le patient à l'aide de la poignée de portage et le brancardier avant soulève la chaise et le patient grâce aux décrochements inférieurs des montants latéraux.

Il est recommandé qu'un troisième brancardier guide le brancardier avant pendant la descente.

Afin de faciliter le portage, de soulager la répartition de la masse et d'assurer le transport en toute sécurité, il est recommandé d'utiliser des Bretelles de Portage (Réf. BST) à l'avant et à l'arrière de la Chaise Portoir Pliable.

Réf. CST



Réf. BST

➤ STOCKAGE

Grâce à sa conception, la Chaise Portoir Pliable occupe un faible volume, et trouve donc aisément sa place dans un véhicule de premiers secours.



PIECES DETACHEES POUR CHAISE PORTOIR PLIABLE

réf. PP

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
1	VR 031	Dossier de chaise portoir PP
2	VR 033	Assise de chaise portoir PP
3	ZRC016	Poignée de portage chromée pour PP
4	ZRC 018B	Toile avec porte document pour chaise portoir PP
5	ZRC 002	Roue fixe montée sur chape pour chaise portoir PP
6	ZRC 014	Montant latéral gauche
7	ZRC 015	Montant latéral droit

ACCESSOIRES POUR CHAISE PORTOIR PLIABLE

réf. PP

8	ZH 002	Bretelles de sécurité, jeu de 2, réf.BST
9	ZH 001	Ceintures de sécurité, jeu de 2, réf. CST

